

## Счетчик линз для станка E-1000

Для доступа к счетчику линз включите станок и выполните следующие действия:

1. Нажать **кнопку STOP** для входа в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
2. Выбрать раздел **«ДИАГНОСТИКА»** и войти в него.
3. Нажать и удерживать более 3 секунд **кнопку со знаком «МИНУС»**.
4. На экране станка появиться информация, состоящая из 7 строк цифр. В строках содержится информация по каждому виду обработки:

Наименование операции или материала линзы	Номер строки	Количество операций или линз
<b>Обработано полимерных линз Trivex, PC, CR-39, Hi-index</b>	1	
<b>Обработка стеклянных линз</b>	2	
<b>Изготовленных линз с V - образным фасетом</b>	3	
<b>Изготовленных линз с П - образным фасетом</b>	4	
<b>Полировка линз со всеми видами фасета</b>	5	
<b>Снятие фаски</b>	6	
<b>Проточка паза под леску</b>	7	

5. Если Вам необходимо стереть информацию из данной таблицы, то нажмите кнопку **ВОЗВРАТ** один раз.
6. Нажмите и удерживайте более 3 секунд **кнопку со знаком «ПЛЮС»**.
7. На экране станка появиться информация и **кнопка CLEAR (стереть)**.
8. Нажмите **кнопку CLEAR (стереть)**.