

Настройка сканера FD-80 перед началом работы.

1. Настройка по эталону оправы.

- 1.1. Установите эталон оправы в держатель оправы и нажмите кнопку 8 более 3 секунд.
- 1.2. Нажмите кнопку 4 два раза, начнется автоматическая настройка размера оправы.
- 1.3. После завершения настройки нажмите кнопку 4. Программа автоматически вернется в исходное меню.
- 1.4. Не снимая эталон оправы, нажмите кнопку 4 для начала сканирования эталона оправы. Данная операция выполняется для проверки точности настройки сканера.
- 1.5. Передайте данные в станок и проверьте на экране станка следующие параметры (+\ - 0,05 мм):
линза R=50,00 / линза L=50,00 / FPD= 70,00

2. Настройка по эталону линзы.

- 2.1. Установите эталон линзы в держатель оправы и нажмите кнопку 8 более 3 секунд.
- 2.2. Нажмите кнопку 4 два раза, начнется автоматическая настройка размера линзы.
- 2.3. После завершения настройки нажмите кнопку 4. Программа автоматически вернется в исходное меню.
- 2.4. Не снимая эталон оправы, нажмите кнопку 4 для начала сканирования эталона линзы. Данная операция выполняется для проверки точности настройки сканера.
- 2.5. Передайте данные в станок и проверьте на экране станка следующие параметры (+\ - 0,05 мм):
линза R=50,00 / линза L=50,00